

## Инструкция по применению медицинского изделия

Перед применением медицинского изделия внимательно прочитайте всю инструкцию, поскольку в ней содержатся важные сведения.

Сохраните эту инструкцию. Возможно, вам потребуется прочитать её еще раз.

Если симптомы не проходят или усиливаются, вам следует обратиться к врачу.

### СуперОптик Complete

Глазные капли с гиалуронатом натрия 0,2% и декспантенолом 2%

Не содержат консервирующих веществ

Интенсивно увлажняющие капли с защитными и регенерирующими свойствами

#### Содержание:

1. Что из себя представляет медицинское изделие СуперОптик Complete, и с какой целью его применяют
2. Важная информация, с которой необходимо ознакомиться перед применением медицинского изделия СуперОптик Complete
3. Как применять медицинское изделие СуперОптик Complete
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить медицинское изделие СуперОптик Complete
6. Прочая информация

#### 1. Что из себя представляет медицинское изделие СуперОптик Complete, и с какой целью его применяют

СуперОптик Complete - это стерильные глазные капли, содержащие гиалуронат натрия и декспантенол, без консервирующих веществ.

- Гиалуронат натрия - натуральное вещество, содержащееся в человеческом организме, например, в слёзной плёнке (слезах).
- Декспантенол - вещество из группы витаминов В, усиливающее свойства гиалуроната натрия.

Эти вещества обеспечивают быстрое, интенсивное и длительное увлажнение, стимулируют регенерацию, защищают и освежают, а также ухаживают за поверхностью глаза.

СуперОптик Complete приносит облегчение глазам при:

- сухости
- ощущении песка, инородного тела
- усталости
- жжении
- зуде
- слезотечении
- раздражении
- временном ухудшении остроты зрения, мутности по причине усталости глаз

Капли восстанавливают натуральный баланс увлажнения глаз, предохраняют от повторного высыхания и способствуют поддержанию их в хорошем состоянии.

СуперОптик Complete содержит гиалуронат натрия - натуральное вещество, создающее равномерный, стойкий и защитный слой на поверхности глаза, сохраняющийся продолжительное время. Он защищает глаз от раздражения и высыхания, не оказывая негативного влияния на зрение.

СуперОптик Complete содержит также декспантенол (провитамин B<sub>5</sub>), который усиливает действие гиалуроната натрия, дополнительно стимулирует процессы регенерации и защищает поверхность глаза.

СуперОптик Complete эффективно увлажняет, предохраняет и создает защитный слой на поверхности глаза, устраняя дискомфорт, связанный с:

- механическим раздражением поверхности глаза, появляющимся, например, во время проведения обследований глаза и при ношении контактных линз;
- использованием косметики, воздействием факторов внешней среды, например, кондиционированного воздуха, холодного, горячего, сухого воздуха, ветра, загрязнения воздуха, например, сигаретным дымом, смогом, а также пребыванием в помещениях с большим уровнем запыления или на солнце;
- усталостью глаз в результате продолжительной концентрации зрения, например, работой перед монитором компьютера, многочасовым управлением автомобилем, чтением, просмотром телевидения, работой со смартфоном;
- слишком маленьким количеством слез или изменением их состава, в том числе у лиц с синдромом сухого глаза и у лиц старше 40 лет

Капли СуперОптик Complete разрешается применять у лиц, носящих контактные линзы любого типа.

## **2. Важная информация, с которой необходимо ознакомиться перед применением медицинского изделия СуперОптик Complete**

**Не следует применять медицинского изделия СуперОптик Complete :**

- в случае аллергии (повышенной чувствительности) на любой компонент изделия;

### **Предостережения и меры предосторожности**

Неизвестно взаимодействие с (влияние на) другими глазными каплями. Если существует необходимость одновременного применения других глазных капель или мази, сделайте как минимум 15-минутный перерыв между их применением. Применяйте СуперОптик Complete последним.

После закапывания может появиться скоропреходящее кратковременное расстройство зрения. В этом случае, до момента прекращения расстройства, не следует управлять автомобилем и обслуживать оборудование.

Возможно также появление скоропреходящего небольшого раздражения/жжения/покалывания. Если симптомы не проходят или усиливаются, следует обратиться к врачу.

При инфекциях глаз применять препарат можно только после консультации с врачом или фармацевтом.

Не прокалывайте флакон перед использованием.

## **3. Как применять медицинское изделие СуперОптик Complete**

Следует соблюдать нижеуказанные рекомендации, которые облегчат надлежащее применение медицинского изделия СуперОптик Complete:

### **Способ применения**

По гигиеническим причинам одной и той же упаковкой изделия может пользоваться только один человек.

- Перед закапыванием изделия СуперОптик Complete необходимо тщательно вымыть руки.
- Перед первым применением следует снять крышку, перевернуть флакон дозатором вниз и слегка нажать на стенки флакона до появления первой капли.
- Перед каждым применением снять крышку и закапать капли в глаз (глаза).
- Обычно применяют 1-2 капли 3 раза в день в конъюнктивный мешок каждого глаза или согласно рекомендациям окулиста.
- Медленно закрыть глаза, чтобы жидкость могла равномерно покрыть всю поверхность глаза (глаз).
- Закрывать флакон.
- Избегать прикосновения концом пипетки к поверхности глаза.

/Shake off remaining drop- Встряхните флакон перед использованием/



Встряхните остатки препарата с капельницы после использования перед закрытием крышки.

Во время использования по мере уменьшения количества жидкости во флаконе, сдавливать его сильнее для применения соответствующего количества препарата. Это связано со спецификой системы укупорки, которая должна обеспечивать сохранение стерильности и свойств капель, не содержащих консервантов.

В связи с тем, что СуперОптик Complete не содержит консервирующих веществ, он, как правило, хорошо переносится и может быть предназначен для длительного применения. Если несмотря на применение изделия, ощущение дискомфорта не проходит и продолжается в течение длительного времени, обратитесь к окулисту.

#### **Превышение рекомендуемой дозы изделия СуперОптик Complete**

Случаи передозировки не отмечались.

#### **4. Возможные побочные эффекты**


В отдельных случаях могут появиться аллергические реакции, такие как жжение, слезотечение глаз, которые проходят после прекращения применения изделия. Непосредственно после закапывания может появиться скоропреходящее кратковременное расстройство зрения. При появлении симптомов аллергической реакции или иных нежелательных симптомов необходимо проинформировать о них производителя.

#### **5. Как хранить изделие СуперОптик Complete**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить флакон плотно закрытым во вторичной упаковке.

Хранить в месте, незаметном и недоступном для детей.

Не применять препарат СуперОптик Complete после истечения срока годности ()  
указанного на флаконе и картонной коробке.  
Изделие можно использовать в течение 90 дней после первого вскрытия флакона.

## 6. Прочая информация

### Состав

СуперОптик Complete содержит: гиалуронат натрия 0,2%; декспантенол 2%; цитрат натрия дигидрат; лимонной кислоты моногидрат; высокоочищенную воду.

Прозрачные, бесцветные глазные капли.

**Упаковка:** флакон содержит 5 мл или 10 мл раствора, оснащен укупорочным средством с клапаном и фильтром, защищающим препарат от заражения микроорганизмами, размещен в картонной коробке.



АО «Польфа Варшава»  
ул. Каролькова, 22/24  
01-207 Варшава, Польша  
тел. +48 22 691 39 00  
[www.polfawar.com.pl](http://www.polfawar.com.pl)

Дата пересмотра инструкции: Март 2018 года.



### Значение символов:



Стерильный препарат



Следует ознакомиться с инструкцией по применению




Использовать до: (срок годности)



Производитель



Номер серии

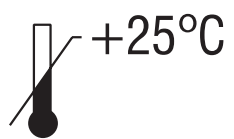

Хранить при температуре не выше 25°C